

# Remin Pro® · Remin Pro® forte

SCHÜTZENDE ZAHNPFLEGE MIT FLUORID UND  
HYDROXYLAPATIT

# Remin Pro® · Remin Pro® forte

## ERHOLUNG FÜR DIE ZÄHNE

Remin Pro und Remin Pro forte kombinieren die drei Komponenten Hydroxylapatit, Fluorid und Xylitol zu einem effektiven Schutz vor Demineralisation und Erosion. Remin Pro forte unterstützt zusätzlich durch Ingwer und Curcuma-Extrakte ganzheitlich die Mundgesundheit. Damit stellen Remin Pro und Remin Pro forte eine optimale Ergänzung der Serviceleistungen Ihrer Praxis dar!

### Hydroxylapatit


Die natürliche Zahnhartsubstanz besteht zu einem großen Teil aus Hydroxylapatit (Calcium und Phosphat). Der in Remin Pro und Remin Pro forte enthaltene Hydroxylapatit füllt oberflächliche Schmelzläsionen und kleinste Unebenheiten auf, die durch Erosion entstehen, lagert sich an die Zahnhartsubstanz an und schützt so den Zahn vor Demineralisation und Erosion. Die Oberfläche wird spürbar geglättet, Dentintubuli oberflächlich verschlossen. Die glatte Oberfläche erschwert zudem die Anhaftung von bakteriellen Zahnbelägen. Gleichzeitig wird die natürliche Remineralisation gefördert und der Zahn dadurch gestärkt.

### Fluorid

Fluorid ist das bewährte Mittel der Kariesprophylaxe. Auf der Zahnoberfläche wird Fluorid in Verbindung mit Speichel zu stabilerem und säureresistenterem Fluorapatit umgewandelt. Das in Remin Pro und Remin Pro forte enthaltene Fluorid (1.450 ppm) stärkt den Zahn und macht ihn damit widerstandsfähiger gegen Säureattacken.

### Xylitol

Der Zuckeraustauschstoff Xylitol ist bekannt für seine kariostatischen Eigenschaften. Xylitol kann von kariogenen Bakterien (anders als z. B. Saccharose) nicht zur schädlichen Milchsäure umgewandelt werden. Auch in Remin Pro und Remin Pro forte ist Xylitol enthalten, so dass die schädliche Wirkung dieser Bakterien bzw. des „Stoffwechselprodukts“ Milchsäure deutlich reduziert werden kann.

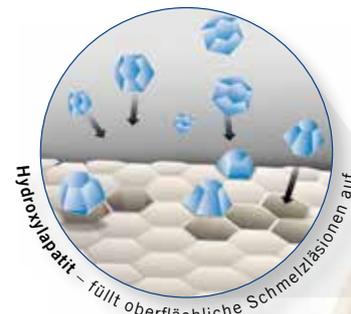


Remin Pro und Remin Pro forte sind die idealen Produkte um die Pflege der Zähne auch sei es mit einer Zahnbürste nach der abendlichen Mundhygiene, dem Finger oder der

## Remin Pro® · Remin Pro® forte

### FÜR EINE STARKE MUNDGESUNDHEIT

Remin Pro ist in den Geschmacksrichtungen Mint, Melone und Erdbeere erhältlich. Der Geschmack von Remin Pro forte wird durch das ätherische Öl des Ingwers, mit seiner angenehm leichten Schärfe, bestimmt. Beide Cremes eignen sich als Abschluss einer vorgelagerten Prophylaxebehandlung, nach dem Bleaching, um einem Feuchtigkeitsentzug vorzubeugen oder beispielsweise während kieferorthopädischen Behandlungen, um auch die Kariesprädispositionsstellen optimal mit den wertvollen Inhaltsstoffen von Remin Pro und Remin Pro forte zu versorgen.

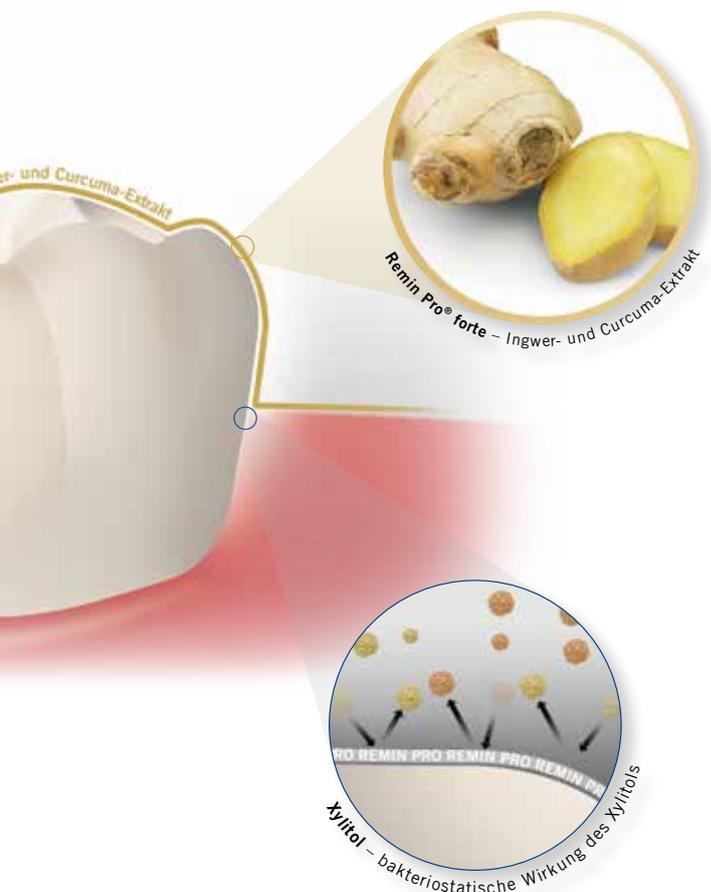

#### Bakterienmanagement mit Ingwer und Curcuma

Für Ingwer-Extrakte wird in der wissenschaftlichen Literatur einheitlich ein antimikrobielles Potential bestätigt. Gleiches gilt für Curcuma-Extrakte, wobei hier gerade auch ein antibakterieller Effekt gegen orale Mikroorganismen, speziell *Streptococcus mutans*, sowie eine antikariogene Wirksamkeit beschrieben wird. Dieser in der wissenschaftlichen Literatur beobachtete und bestätigte Effekt wird durch die bereits bekannten und millionenfach bewährten Wirkungsmechanismen des Fluorids, Hydroxylapatits und Xylitols ergänzt.

#### Ganzheitliche Mundpflege

Ingwer und Curcuma wirken sich nicht nur positiv auf die Zahnhartsubstanz, sondern auch auf die Mundschleimhäute aus. Die bakterio-statischen Eigenschaften beider Pflanzenstoffe werden durch entzündungshemmende und durchblutungsfördernde Eigenschaften ergänzt. Die von Ingwer bekannte leichte Schärfe fördert die Durchblutung des Zahnfleisches und regt den Speichelfluss an. Die entzündungshemmenden Komponenten des Curcumas und Ingwers unterstützen die Abheilung und Regeneration gereizter Schleimhäute, wie sie etwa bei Aphten vorkommen.

#### Schonende CO<sub>2</sub>-Technologie für wertvolle Inhaltsstoffe

Ingwer- und Curcuma-Extrakt werden mit Hilfe der CO<sub>2</sub>-Extraktionstechnologie aus den Rhizomen gewonnen, den arzneilich genutzten Teilen dieser Pflanzenstoffe. Dabei werden die in den Pflanzen enthaltenen ätherischen Öle auf besonders schonende Art gewonnen und können unter Beibehalten ihres natürlichen Aromas ihre volle Kraft entfalten.

#### Oder



zu Hause weiter führen können. Der Patient kann die Creme sehr einfach auftragen, individuellen Zahnschiene.

## Remin Pro® · Remin Pro® forte

### SCHÜTZENDE ZAHNPFLEGE MIT FLUORID UND HYDROXYLAPATIT

#### Indikationen

- Nach dem Bleaching
- Nach der professionellen Zahnreinigung
- Vorbeugung und Kontrolle von Hypersensibilitäten
- Während einer kieferorthopädischen Behandlung



#### Handelsformen

##### Remin Pro®

- REF 2003 Tube 12 × 40 g Melone
- REF 2004 Tube 12 × 40 g Minze
- REF 2005 Tube 12 × 40 g Erdbeere
- REF 2006 Tube 12 × 40 g mixed
- REF 2007 Tube 3 × 40 g mixed

##### Remin Pro® forte

- REF 2008 Tube 40 g Ingwer
- REF 2014 Tube 12 × 40 g Ingwer

#### Vorteile

##### Remin Pro®

- Enthält Fluorid (1.450 ppm), Hydroxylapatit und Xylitol
- Sorgt für ein Gleichgewicht der Mundflora und schützt die Zähne somit vor schädlichen Säureattacken
- Stärkt die Zähne nach dem Bleaching und der professionellen Zahnreinigung
- Kariostatische Eigenschaften durch enthaltenes Xylitol
- In drei aromatischen Geschmacksrichtungen erhältlich (Melone, Mint, Erdbeere)
- Täglich anwendbar und besonders gut für den Hausgebrauch geeignet

##### Remin Pro® forte

- Mit Fluorid, Hydroxylapatit und Xylitol
  - Wiederherstellung der Mineralbilanz
  - Neutralisation von Säuren aus der Plaque
- Zusätzlich mit hochwertigen Ingwer- und Curcuma-Extrakten
  - antibakterieller und entzündungshemmender Effekt
- Ganzheitliche Unterstützung der Mundgesundheit
  - Vorbeugung und Kontrolle von Hypersensibilitäten
  - Unterstützung bei der Heilung und Regeneration gereizter Schleimhäute

VOCO GmbH  
Anton-Flettner-Straße 1-3  
27472 Cuxhaven  
www.voco.de

#### VOCO-Kundenservice

Freecall: 00 800 44 444 555  
Fax: +49 (0) 4721-719-2931  
service@voco.de

Zu beziehen durch: