

Jetzt neu:  
**Bubble Gum**



# VOCO Profluorid® Varnish

FLUORIDHALTIGER LACK ZUR ZAHNDESENSIBILISIERUNG

# VOCO Profluorid® Varnish


## STARKE WIRKUNG

Empfindliche Zähne sind ein in der Bevölkerung weit verbreitetes Problem. Sie verursachen beim Patienten meist temporäre Schmerzen, die gegenüber dem Behandler nicht immer erwähnt werden. Die Ursache für Hypersensibilität sind in aller Regel offene Dentintubuli. Daher ist es Ziel der Behandlung, diese langfristig zu verschließen. Profluorid Varnish ist ein fluoridhaltiger Lack, der nach Kavitätenpräparationen oder bei empfindlichen Zahnhälsen die freiliegenden Dentintubuli effektiv versiegelt.


### Zusammensetzung und Wirkung von VOCO Profluorid® Varnish

Profluorid Varnish ist ein kolophoniumbasierter Lack mit einem Natriumfluoridgehalt von 5 % (entspricht 22.600 ppm Fluorid). Das Fluoridion bewirkt zusammen mit in den Tubuli angereicherten Calciumionen eine Fällung von Calciumfluorid, die zum sicheren Verschluss der Tubuli führt. Eine Anwenderbefragung ergab, dass über 85 % der Patienten bereits nach der ersten Behandlung mit Profluorid Varnish absolut schmerzfrei gewesen sind.

Neben dem schnellen Verschluss der Dentintubuli bewirkt Profluorid Varnish die Bildung von Calciumfluoriddepots an der Zahnoberfläche und langfristig die Förderung der Bildung von Fluorapatit, das den Zahn vor Säureattacken schützt.

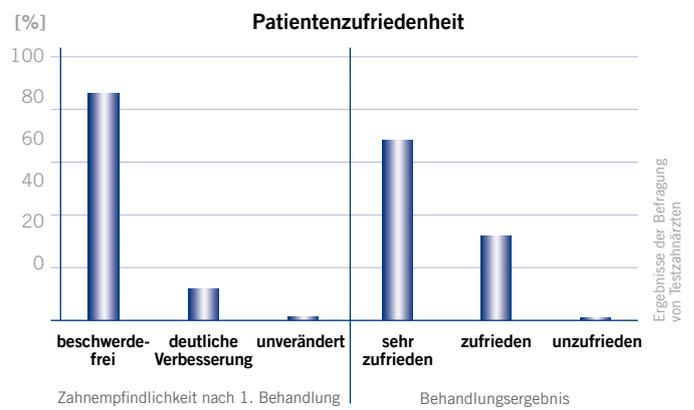

Weiterhin ist dem Lack Xylitol beigegeben. Neben seiner geschmacksverbessernden Eigenschaft besitzt Xylitol eine nachgewiesene kariostatische Wirkung.

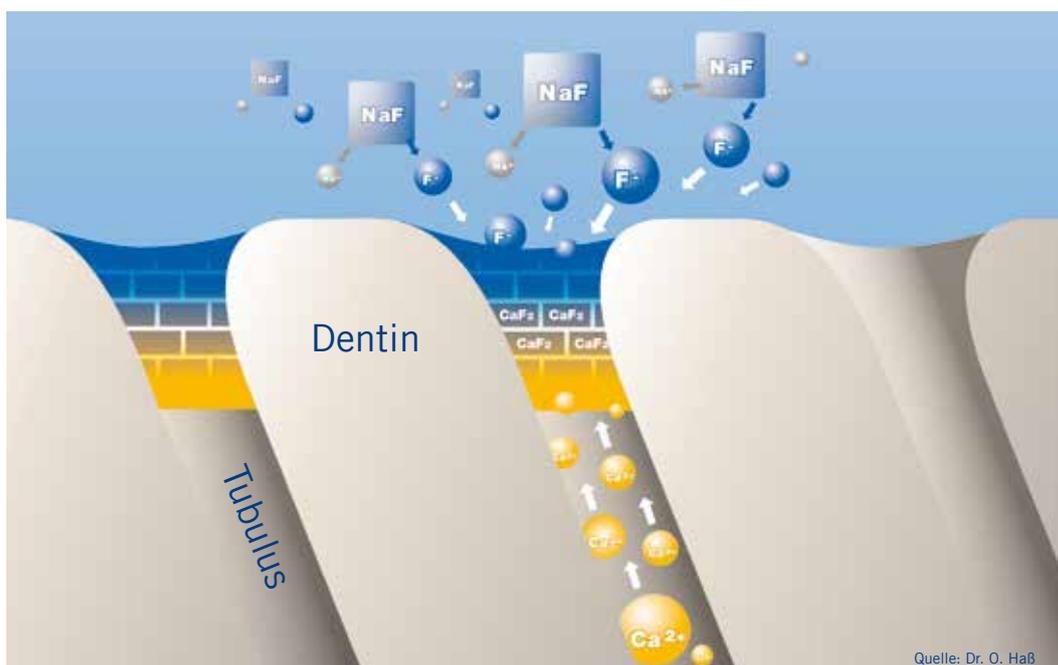

# VOCO Profluorid® Varnish


## EINFACH UND ÄSTHETISCH

### Leichte Anwendung

Die Kolophoniummatrix von Profluorid Varnish ermöglicht eine gute Haftung auch an feuchten Oberflächen. Eine vorherige Trocknung der zu behandelnden Flächen ist demnach nicht notwendig, so dass die Anwendung sehr zeitsparend ist. Dadurch wird die Kooperationsbereitschaft von Patienten mit geringer Compliance (z. B. Kinder) gesteigert.

### Ästhetik und Geschmack

Profluorid Varnish ist ein zahnfarbener Lack, der die Ästhetik nicht beeinträchtigt. Profluorid Varnish ist in fünf angenehmen Geschmacksrichtungen erhältlich: Bubble Gum und Kirsche insbesondere für Kinder und jüngere Patienten, Minze als klassischer Geschmack vor allem für Erwachsene, Karamell als cremige Variante und Melone als der eher exotische Geschmack. Mit den fünf raffinierten Geschmacksrichtungen können Sie noch mehr Service bieten und individuell auf Ihren Patienten eingehen.

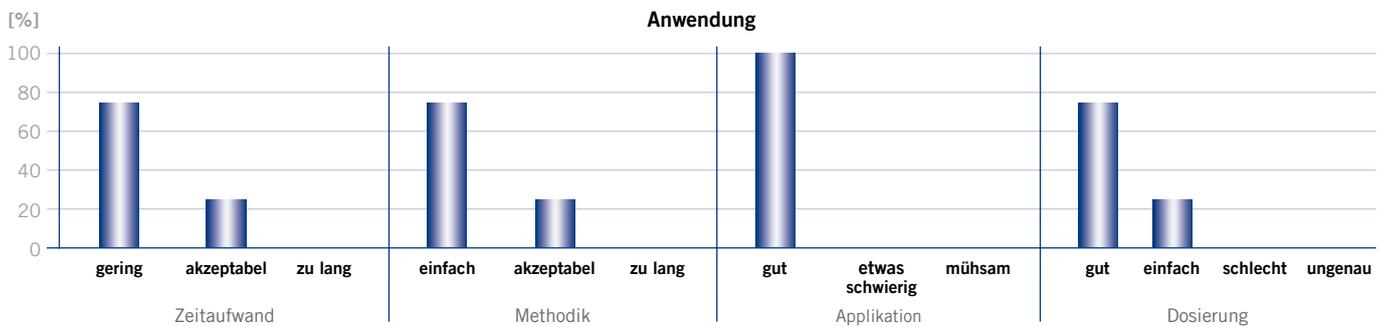

Ergebnisse der Befragung von Testzahnärzten

### Meinung von Zahnärzten

Zahnärzte, die das Produkt anwenden, attestieren Profluorid Varnish durchweg gute Handling- und ästhetische Eigenschaften, wobei das Gros der Anwender sogar einen deutlichen Vorteil zu Wettbewerbsprodukten feststellt. Ebenso gut schneidet Profluorid Varnish im Votum der Patienten ab.

Fast alle Befragten sind nach der Behandlung beschwerdefrei oder bestätigen eine deutliche Verbesserung. Profluorid Varnish: weit mehr als eine Frage des guten Geschmacks!

### Einfache und ästhetische Desensibilisierung mit VOCO Profluorid® Varnish



#### Die Vorteile der SingleDose

Der Blister der Profluorid Varnish SingleDose enthält einen Pinsel und den Lack, womit ein hygienisch einwandfreies Produkt zur Anwendung gebracht wird.

### Anwendung der Zylinderampulle



#### Die Vorteile der Zylinderampulle

Mit der bewährten Zylinderampulle können Sie sowohl punktgenau applizieren als auch eine komplette Fluoridapplikation in einem Zug durchführen.

# VOCO Profluorid® Varnish

## SIE HABEN DIE WAHL

### Indikationen

Behandlung von hypersensiblen Zähnen  
 Versiegelung der Dentintubuli bei Kavitätenpräparationen  
 oder empfindlichen Wurzeloberflächen

### Produktvorteile

- Problemlose Anwendung auf feuchten Oberflächen
- Ästhetischer, zahnfarbener Lack
- Schnelle Desensibilisierung und Fluoridabgabe (5 % NaF  $\approx$  22.600 ppm Fluorid)
- In fünf Geschmacksrichtungen erhältlich: Melone, Minze, Kirsche, Karamell und Bubble Gum
- Dünn aufzutragen und dadurch ergiebig

### Vorteile der SingleDose

- Einfach, schnell und hygienisch zu applizieren
- Ohne zusätzliche Halterung verwendbar
- Auslaufsicher in jeder Position

### Vorteile der Zylinderampulle

- Mehrfache Verwendung durch Einsatz von Einwegkanülen
- Punktgenaue Applikation
- Einfachste approximale Anwendung
- Komplette Fluoridapplikation in nur einem Zug



### Handelsformen

Geschmack	SingleDose 48 x 0,40 ml	SingleDose 50 x 0,25 ml	SingleDose 50 x 0,40 ml	SingleDose 200 x 0,40 ml	Tube 10 ml	Tube 50 ml	Zylinderampulle 5 x 1,70 ml
Melone	–	REF 1268	REF 1269	REF 1271	REF 1267	REF 1272	REF 2235
Karamell	–	–	REF 2226	REF 2229	REF 2232	–	–
Kirsche	–	–	REF 2227	REF 2230	REF 2233	–	–
Minze	–	–	REF 2228	REF 2231	REF 2234	–	–
Bubble Gum	–	–	REF 2238	REF 2239	–	–	–
Mixed	REF 2225	–	–	–	–	–	–
REF 2167 Applikationskanülen Typ 43 für Zylinderampullen, 100 Stk.							

VOCO GmbH  
 Anton-Flettner-Straße 1-3  
 27472 Cuxhaven  
 www.voco.de

**VOCO-Kundenservice**  
 Freecall: 00 800 44 444 555  
 Fax: +49 (0) 4721-719-2931  
 service@voco.de

Zu beziehen durch:

