

# DESCOCEPT SPEZIAL WIPES

## alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion

- ✓ alkoholfrei
- ✓ aldehydfrei
- ✓ phenolfrei

- alkoholfreie Tücher zur schnellen Desinfektion großer Flächen
- schnell wirksam
- besonders materialschonend
- praktisch in der Anwendung



CE 0482



### PRÄPARATETYP

Alkoholfreie, gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art, in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung und Großküchen sowie im medizinischen Bereich. Auf der Basis von quaternären Ammoniumverbindungen.

**DESCOCEPT SPEZIAL WIPES** sind alkoholfrei und enthalten keine Aldehyde und Phenole. Durch die hohe, flusenfreie Materialqualität, garantierte Wirkstoffabgabe und gute Reinigungskraft eignen sich **DESCOCEPT SPEZIAL WIPES** besonders gut für alle professionellen Anwendungen.

### ANWENDUNGSBEREICHE

**Gem. MPG:** Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen, nichtinvasiven Medizinprodukten.

**Gem. Biozid-Richtlinie:** Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen.

### ANWENDUNG

Flächen und Gegenstände bis zur vollständigen Benetzung abwischen und Einwirkzeit beachten.

**DESCOCEPT SPEZIAL WIPES** sind gebrauchsfertig, einzeln über den wiederverschließbaren Feuchttuchspender entnehmbar und schnell einsetzbar. Nach Tuchentnahme den Deckel des Feuchttuchspenders wieder verschließen.

Die Haltbarkeit der angebrochenen Packung im Feuchttuchspender beträgt 28 Tage.

**Befüllen des Feuchttuchspenders:** Nachfüllpackung inkl. Beutel direkt in den Feuchttuchspender gleiten lassen. Öffnen Sie die Nachfüllpackung. Ziehen Sie aus der Rollenmitte das erste Tuch durch die Öffnung im Deckel des Feuchttuchspenders und setzen Sie den Deckel wieder auf den Feuchttuchspender. Bitte befüllen Sie den Feuchttuchspender nur mit einer **DESCOCEPT SPEZIAL WIPES** Nachfüllpackung.

### WIRKUNGSSPEKTRUM

Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit

#### **DESCOCEPT SPEZIAL**

- bakterizid inkl. MRSA
- levurozid
- virusinaktivierend inkl. HBV, HIV, HCV, Rota-, Papova-/Polyoma- und Vaccinia-Viren (begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung)

### EINWIRKZEITEN

Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit

#### **DESCOCEPT SPEZIAL**

**bakterizid inkl. MRSA, levurozid gem. DGHM/VAH/** (hohe organische Belastung) 1 Min.\*

\* gelistet in der 5-Minuten-Spalte der VAH-Liste

**wirksam gegen alle behüllten Viren inkl. HBV/HIV/HCV/ Vaccinia-/BVDV-/Influenza-/Grippeviren** (begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung): 30 Sek.

**Rota-Viren:** 30 Sek.

**Papova-/Polyoma-Viren:** 2 Min.

### ZUSAMMENSETZUNG

100 g Tränkflüssigkeit **DESCOCEPT SPEZIAL** enthalten als wirksame Bestandteile:

- 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid
- 0,5 g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride



# **DESCOCEPT SPEZIAL WIPES**

alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion

## CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit

**DESCOCEPT SPEZIAL**

Form / Farbe: klare, farblose Lösung  
pH-Wert: 6 - 8

## LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
Nachfüllpack mit 1 Rolle à 100 Tüchern (305 x 320 mm)	2 x 1 Rolle	–	00-208-RS100-01
Feuchttuchspender mit 1 Rolle à 100 Tüchern (305 x 320 mm)	1 x 1 Eimer	–	00-208-ERS100

## BESONDERE HINWEISE

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

## UMWELTINFORMATION

Die Produkte der Dr. Schumacher GmbH werden nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren hergestellt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards wird eine gleichbleibende, sehr gute Produktqualität sichergestellt. Das Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS.

## GUTACHTEN

**Prof. Werner**, Hygieniker, Bischofshofen:  
Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH Richtlinien.  
Gutachten zur Wirksamkeit gegen SV40/Polyoma-Viren gem. EN 14476

**Prof. Schubert**, Hygieniker, Frankfurt/M.:  
Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtlinien.

**Dr. Steinmann**, Virologe, Bremen:  
Gutachten zur Wirksamkeit gegen Vaccinia-Viren.  
Gutachten zur Wirksamkeit gegen BVDV.  
Gutachten zur Wirksamkeit gegen Rota-Viren.

## PRODUKTSTATUS/LISTUNGEN

Die Tränkflüssigkeit **DESCOCEPT SPEZIAL** ist gelistet in der aktuellen VAH/DGHM-Liste und in der ÖGHMP-Liste. Gelistet in der IHO-Viruzidie-Liste ([www.iho-viruzidie-liste.de](http://www.iho-viruzidie-liste.de)) Gemeldet als Biozidprodukt bei der baua (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: baua Reg.-Nr.: N-46452, N-46453 Entspricht der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

